



SAFEHORSE® of Sweden

Hästtermometer

Egenskaper:

- Snabb avläsning
- Lätt att använda
- Ergonomisk och säker
- Den speciella längden gör det möjligt att ta temperaturen på rätt plats och det unika handtaget förhindrar att termometern glider för långt in.
- Det tar bara 20 - 25 sekunder att mäta temperaturen
- Hög tillförlitlighet av mätning, utan giftigt kvicksilver.
- Lätt att rengöra med ljummet vatten.
- Batteri LR41 kan bytas lätt utan specialverktyg
- Material: ABS plastic, ej giftigt, miljöklassat
- Längd: 24 cm

Manual:

Enkel instruktion: Tryck på knappen - Ta tempen - Pip - Läs av - Tryck på knappen igen.

Utförlig instruktion: Tryck ner knappen för att starta. I fönstret visas först 188.8, därefter Lo, för att följas av 37,0, eller senast mätta värde, sedan syns Lo åter i fönstret, tillsammans med ett blinkande C. Nu är termometern klar att användas. När mätningen är klar piper termometern efter ca 20-25 sekunder. Tryck ner knappen igen för att avsluta.

OBS Lo- betyder Loading - inte Low battery.

Säkerhet:

Mät temperaturen på hästen med försiktighet, framför allt om det är första gången. Stå nära, vid ena sidan av hästens bakdel, och för varsamt svansen lite åt sidan. Använd gärna vaselin för att termometern lättare ska glida in. Prata lugnande med hästen och var aktsam. Mät temperaturen. Normal temperatur för häst är mellan 37,2 - 38,2°, föl kan ha något högre. Feber räknas från >38,5°

